


## FICHE TECHNIQUE COIN SPONGIEUX

- Dénomination :** C+TBA COIN SPONGIEUX
- Fabricant :** C+TBA (Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige).Crée en 2004.
- Adresse :** Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Autriche
- Références :** Voir ci-dessous
- Description :** Os spongieux ou corti spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
- Indications :** Comblement des defects osseux

### Image du produit

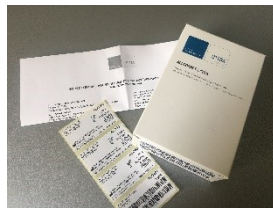

- Procédé :**
- Mise en forme manuelle
  - Délipidation dans un bain à ultrasons (50°), ainsi que centrifugation, puis purification avec des réactifs de solvant (éther diéthylique, éthanol)
  - Élimination de l'antigénicité (H2O2)
  - Déshydratation par lyophilisation
  - Mise en emballage
  - Stérilisation par la méthode Stérilisation Gamma

### Matériaux

**Composition:** Os spongieux (100 %) ou lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6%

Graisse : < 4%

**Emballage :** Double blister stérile (Classe A). A conserver entre +5°C et +30°C .Date de péremption à 5 ans  
Stérilisation : Gamma

Poids: 30 grammes

## FICHE TECHNIQUE COIN SPONGIEUX

### Conservation et stockage :

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (entre +5°C et +30°C) .A l'abri de la lumière.

### Sécurité:

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations délivrées par Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Mise sur l'autorisation de commercialisation : INS-680043-0019-007

La C+TBA comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test HIV 1-2-Ab; Ag p24; HBsAg; Hbc-Ab ; HCV-Ab; HTLV I/II-Ab; HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA, et Treponema Palladium-Ab –
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.

### Distribution :

**NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

**Email: [info@novomedics-france.fr](mailto:info@novomedics-france.fr)**

**Références** :Coin spongieux ou cortico spongieux



| Désignation            | Angle     | Hauteur          | Réf donneur vivant | Réf donneur décédé | Code LPP |
|------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Coin Cortico spongieux | 15°       |                  |                    | ALO410FR           | 3395855  |
| Coin spongieux         | 7° petit  | 4,5mm - <5,5mm   | LALO460FR          |                    | 3306627  |
| Coin spongieux         | 7° grand  | 5,5mm - 7mm      | LALO462FR          |                    | 3394353  |
| Coin spongieux         | 10°petit  | 6,6mm - <7,8mm   | LALO463FR          |                    | 3395855  |
| Coin spongieux         | 10° grand | 7,8mm - 10mm     | LALO465FR          |                    | 3394353  |
| Coin spongieux         | 13° petit | 8,5mm - <10,1mm  | LALO466FR          |                    | 3394353  |
| Coin spongieux         | 13° grand | 10,1mm - 13mm    | LALO468FR          |                    | 3394353  |
| Coin spongieux         | 16° petit | 10,5mm - <12,4mm | LALO469FR          |                    | 3394353  |
| Coin spongieux         | 16° grand | 12,4mm - 16mm    | LALO470FR          |                    | 3394353  |