

FICHE TECHNIQUE DE BLOCS SPONGIEUX ET CORTI SPONGIEUX

Dénomination :	C+TBA- BLOCS SPONGIEUX
Fabricant :	C+TBA (Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige).Crée en 2004.
Adresse :	Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Autriche
Références :	Voir ci-dessous
Description :	Os spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
Indications :	Comblement des defects osseux

Image du produit



Procédé :	<ul style="list-style-type: none">▪ Mise en forme manuelle▪ Délipidation dans un bain à ultrasons (50°), ainsi que centrifugation, puis purification avec des réactifs de solvant (éther diéthylique, éthanol)▪ Élimination de l'antigénicité (H2O2)▪ Déshydratation par lyophilisation▪ Mise en emballage▪ Stérilisation par la méthode Stérilisation Gamma
------------------	---

Matériaux

Composition: Copeaux d'OS spongieux (100 %) lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6% Graisse : < 4%

Emballage :	Double blister stérile (Clase A). A conserver entre +5°C et +30°C .Date de péremption à 5 ans Stérilisation : Gamma
--------------------	--

FICHE TECHNIQUE DE BLOCS SPONGIEUX ET CORTI SPONGIEUX

Poids: 30 grammes

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (entre +5°C et +30°C) .A l'abris de la lumière.

Conservation et stockage

Sécurité:

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations délivrées par Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Mise sur l'autorisation de commercialisation : INS-680043-0019-007

La C+TBA comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test HIV 1-2-Ab; Ag p24; HBsAg; Hbc-Ab ; HCV-Ab; HTLV I/II-Ab; HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA, et Treponema Palladium-Ab –
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.

Distribution :

NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58

Email: info@novomedics-france.fr

Références :

Blocs spongieux ou corti spongieux..



Dénomination commerciale	Caractéristiques du produit Dimensions en mm G = Granulométrie Vol. = Volume	Codes LPP	Référence donneur vivant
Bloc Spongieux	V=6,75cc 15x15x30mm	3341960	LALO401FR
Bloc Spongieux	V=2cc 10x10x20mm	3308307	LALO409FR
Bloc Spongieux	v=3cc 10x10x30mm	3308307	LALO400FR

* Référence LALXXXX : donneur vivant

** Référence ALXXXX : donneur décédé