


## FICHE TECHNIQUE CUBES SPONGIEUX

<b>Dénomination :</b>	C+TBA CUBES SPONGIEUX
<b>Fabricant :</b>	C+TBA (Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige).Crée en 2004.
<b>Adresse :</b>	Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Autriche
<b>Références :</b>	Voir ci-dessous
<b>Description :</b>	Os spongieux ou corti spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
<b>Indications :</b>	Comblement des defects osseux

### Image du produit

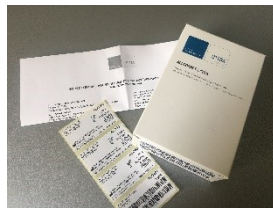

<b>Procédé :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise en forme manuelle</li><li>■ Délipidation dans un bain à ultrasons (50°), ainsi que centrifugation, puis purification avec des réactifs de solvant (éther diéthylique, éthanol)</li><li>■ Élimination de l'antigénicité (H2O2)</li><li>■ Déshydratation par lyophilisation</li><li>■ Mise en emballage</li><li>■ Stérilisation par la méthode Stérilisation Gamma</li></ul>
------------------	---

### Matériaux

**Composition:** Os spongieux (100 %) ou lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6%

Graisse : < 4%

<b>Emballage :</b>	Double blister stérile (Clase A). A conserver entre +5°C et +30°C .Date de péremption à 5 ans Stérilisation : Gamma
--------------------	--

## FICHE TECHNIQUE CUBES SPONGIEUX

Poids: 30 grammes

**Conservation et stockage**

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (entre +5°C et +30°C) .A l'abris de la lumière.

**Sécurité:**

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations délivrées par Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Mise sur l'autorisation de commercialisation : INS-680043-0019-007

La C+TBA comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test HIV 1-2-Ab; Ag p24; HBsAg; HBc-Ab ; HCV-Ab; HTLV I/II-Ab; HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA, et Treponema Palladium-Ab –
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.

**Distribution :**

**NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

**Email: [info@novomedics-france.fr](mailto:info@novomedics-france.fr)**

**Références :** Cubes spongieux ou cortico spongieux



Désignation	Taille: V=Volume G=gralunométrie	Réf donneur vivant r	Code LPP
Cube Spongieux	V=10 cc 5x5x5mm	LALO325FR	3388068
Cube Spongieux	V=20cc 5x5x5mm	LALO314FR	3345248