

## FICHE TECHNIQUE CYLINDRE SPONGIEUX

<b>Dénomination :</b>	C+TBA CYLINDRE SPONGIEUX
<b>Fabricant :</b>	C+TBA (Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige).Crée en 2004.
<b>Adresse :</b>	Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Autriche
<b>Références :</b>	Voir ci-dessous
<b>Description :</b>	Os spongieux ou corti spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
<b>Indications :</b>	Comblement des défauts osseux

### Image du produit



<b>Procédé :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise en forme manuelle</li><li>■ Délipidation dans un bain à ultrasons (50°), ainsi que centrifugation, puis purification avec des réactifs de solvant (éther diéthylique, éthanol)</li><li>■ Élimination de l'antigénicité (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)</li><li>■ Déshydratation par lyophilisation</li><li>■ Mise en emballage</li><li>■ Stérilisation par la méthode Stérilisation Gamma</li></ul>
------------------	---

### Matériaux

**Composition:** Os spongieux (100 %) ou lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

---

Minéraux : 61-64%

---

Colagène: 31-35%

---

Humidité résiduelle: <6%

---

Graisse : < 4%

**Emballage :** Double blister stérile (Classe A). A conserver entre +5°C et +30°C .Date de péremption à 5 ans  
Stérilisation : Gamma

Poids: 30 grammes

## FICHE TECHNIQUE CYLINDRE SPONGIEUX

### Conservation et stockage :

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (entre +5°C et +30°C) .A l'abri de la lumière.

### Sécurité:

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations délivrées par Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Mise sur l'autorisation de commercialisation : INS-680043-0019-007

La C+TBA comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test HIV 1-2-Ab; Ag p24; HBsAg; HBeAg; HBeAb ; HCV-Ab; HTLV I/II-Ab; HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA, et Treponema Palladium-Ab –
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.

### Distribution :

**NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

**Email: [info@novomedics-france.fr](mailto:info@novomedics-france.fr)**

### Références :Cylindre spongieux



Désignation	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf donneur vivant	Code LPP
Cylindre spongieux	10	30	LALO424FR	3335675
Cylindre spongieux	12	20	LALO425FR	3335675
Cylindre spongieux	12	30	LALO426FR	3335675
Cylindre spongieux	14	20	LALO427FR	3335675
Cylindre spongieux	14	30	LALO428FR	3335675