

## FICHE TECHNIQUE ANNEAUX SPONGIEUX

- Dénomination :** C+TBA ANNEAUX SPONGIEUX
- Fabricant :** C+TBA (Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige).Crée en 2004.
- Adresse :** Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Autriche
- Références :** Voir ci-dessous
- Description :** Os spongieux ou corti spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
- Indications :** Comblement des defects osseux

### Image du produit



- Procédé :**
- Mise en forme manuelle
  - Délipidation dans un bain à ultrasons (50°), ainsi que centrifugation, puis purification avec des réactifs de solvant (éther diéthylique, éthanol)
  - Élimination de l'antigénicité (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)
  - Déshydratation par lyophilisation
  - Mise en emballage
  - Stérilisation par la méthode Stérilisation Gamma

### Matériaux

**Composition:** Os spongieux (100 %) ou lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6%

Graisse : < 4%

**Emballage :** Double blister stérile (Classe A). A conserver entre +5°C et +30°C .Date de péremption à 5 ans  
Stérilisation : Gamma

Poids: 30 grammes

## FICHE TECHNIQUE ANNEAUX SPONGIEUX

### Conservation et stockage :

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (entre +5°C et +30°C) .A l'abri de la lumière.

### Sécurité:

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations délivrées par Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Mise sur l'autorisation de commercialisation : INS-680043-0019-007

La C+TBA comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test HIV 1-2-Ab; Ag p24; HBsAg; Hbc-Ab ; HCV-Ab; HTLV I/II-Ab; HBV-DNA; HCV-RNA; HIV-RNA, et Treponema Palladium-Ab –
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.

### Distribution :

**NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

**Email: [info@novomedics-france.fr](mailto:info@novomedics-france.fr)**

### Références :Anneaux spongieux



Désignation	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf donneur vivant	Code LPP
Anneau spongieux (1,5 mm)	26	10	LALO431FR	3306627
Anneau spongieux (1,5 mm)	32	10	LALO433FR	3306627
Anneau spongieux (1,5 mm)	26	20	LALO432FR	3395855
Anneau spongieux (1,5 mm)	32	20	LALO434FR	3394353
Anneau spongieux (7,7 mm)	26	10	LALO436FR	3306627
Anneau spongieux (7,7 mm)	32	10	LALO437FR	3306627
Anneau spongieux (7,7 mm)	26	20	LALO435FR	3335675
Anneau spongieux (7,7 mm)	32	20	LALO430FR	3394353